

## Istruzioni per l'uso

### **Gutta Percha Points**

(Italian Version) 

#### **Punti endodontiche arrotolate a mano**

Utilizzati per riempire otturazioni prima della ricostruzione del dente.

#### **Composizione**

Gutta Percha, Ossido di zinco, Solfato di bario, Agenti colorante

#### **Utilizzo**

1. Controllare l'integrità del prodotto, l'eventuale presenza di impurità e idoneità della forma per l'uso.
2. Controllare la data di scadenza del prodotto.
3. Dopo il trattamento dell'otturazione del dente danneggiato, utilizzare un gutta percha di dimensioni adeguate al riempimento.
4. Questo prodotto può essere gettato dopo l'uso.

#### **Destinazione**

1. Uso di destinazione: utilizzato per riempire un'otturazione prima della ricostruzione del dente.
2. Istruzioni: utilizzato per riempire un'otturazione prima della ricostruzione del dente.
3. Controindicazioni: Non utilizzare su pazienti allergici a questo prodotto.
4. Tipologia pazienti: Tutte l'età
5. Utilizzatore previsto: Dentista
6. Effetti collaterali/Effetti avversi: Non ci sono effetti collaterali o effetti avversi segnalati.
7. Potenziale rischio se riutilizzato: Il riutilizzo di un Gutta Percha point già usato potrebbe causare infiammazione.
8. Può essere utilizzato con un sigillante o cemento. Utilizzare sotto il controllo del dentista, secondo le indicazioni cliniche.
9. Dispositivo monouso

#### **Precauzioni**

1. Utilizzare solo da professionisti dentali.
2. Non utilizzare se il prodotto è scaduto.
3. Prima dell'uso, assicurarsi che non siano presenti infezioni all'interno dell'otturazione.
4. Non utilizzare su pazienti allergici a questo prodotto.

#### **Conservazione**

Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di luce diretta

**Smaltimento** : Gettare il contenuto/la scatola secondo i regolamenti del proprio paese.

**Durata** : 4 anni dalla data di produzione

**Radiopaco**: Equivalente a uno spessore di 6 mm di alluminio

#### **Simboli**



**SURE DENT CORPORATION (Produttore)**

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  
 Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

**Rappresentante Autorizzato**

Europe - **OBELIS S.A.** - Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium  
 Switzerland - **Obelis GmbH** - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Switzerland

■ In caso di gravi incidenti relativi al dispositivo, inviare una segnalazione al produttore e alle autorità competenti nello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente si trovano.

■ Il SSCP (Riassunto della sicurezza e della prestazione clinica) può essere scaricato dal sito <http://www.suredent.com>.

## ■ Designazione della taglia e lunghezza

(Dimensioni in millimetri)

Misura			Diametro punta	Lunghezza (minimo)	Misura	Diametro punta	Lunghezza (minimo)
Taper .02	Taper .04	Taper .06					
08.02	-	-	0.08	28	X-Fine	0.10	28
10.02	-	-	0.10		F-Fine	0.12	
15.02	15.04	15.06	0.15		M-Fine	0.14	
20.02	20.04	20.06	0.20		Fine	0.13	
25.02	25.04	25.06	0.25		F-Medium	0.16	
30.02	30.04	30.06	0.30		Medium	0.17	
35.02	35.04	35.06	0.35		M-Large	0.15	
40.02	40.04	40.06	0.40		Large	0.23	
45.02	45.04	45.06	0.45		X-Large	0.18	
50.02	50.04	50.06	0.50		F-Large	0.20	
55.02	55.04	55.06	0.55		XX-Fine	0.21	21
60.02	60.04	60.06	0.60		L-Medium	0.11	
70.02	70.04	70.06	0.70		Small	0.14	15
80.02	80.04	80.06	0.80		F-Small	0.17	17
90.02	-	-	0.90				
100.02	-	-	1.00				
110.02	-	-	1.10				
120.02	-	-	1.20				
130.02	-	-	1.30				
140.02	-	-	1.40				
					F1	0.20	28
					F2	0.25	
					F3	0.30	
					F4	0.40	
					F5	0.50	

※ Vi preghiamo di contattarci per altre dimensioni speciali.

Distribuito da:

**Curasept S.p.A.****Via G. Parini 19,****Saronno (VA)****Tel. +39 02 96 22 799**