



Oplysninger på andre sprog er tilgængelige ved at scanne QR-koden eller på www.curaseptspa.it



Curasept ADS DNA-linjen (mundskyl 0, 20, 0,12 og gel 0,5) danner takket være tilstedeværelsen af PVPVA copolymer en beskyttende film på tænderne og tandkødet, der med en mekanisk virkning bidrager til at lindre symptomerne forårsaget af irritation af mundhulen. Den samme mekanisme forhindrer desuden dannelse og aflejring af plak på tænderne. Derfor kan produktet bruges til at supplere eller erstatte normale mekaniske mundhygiejnemanøvrer. Tilstedeværelsen af DNA-fractioner øger opløsningernes viskositet og øger slimhindernes hydrering og velvære.

ADS NEW ANTI DISCOLORATION SYSTEM

Ekstern farvning af tænderne er en mulig konsekvens af langvarig brug af produkter, som indeholder chlorhexidin. ADS-systemet, der er perfektioneret med N-acetylcystein* (NAC), som forbedrer dets aktivitet, interfrererer med pigmenteringens tre vigtigste mekanismer og hjælper med at reducere intensiteten og omfanget af dem og beskytter tændernes hvidhed.

CURASEPT ADS NEW | DNA MUNDSKYL 0,20



PRODUKTET INDEHOLDER PVP-VA-COPOLYMER (1%) OG CHLORHEXIDINDIGLUCONAT (0,20%) OG ANBEFALES TIL INTENSIVE BEHANDLINGER MOD PLAK

Det anbefales at bruge det i tilfælde af:

- Før og efter tandbehandlinger.
- Irritation og rødme i slimhinder og tandkød
- Parodontitis
- Tandkødsbetændelser

CURASEPT ADS NEW | DNA MUNDSKYL 0,12



Flaske med 200 ml.
Fås også i 500 ml format.

GELEN INDEHOLDER PVP-VA-COPOLYMER (1%) OG CHLORHEXIDINDIGLUCONAT (0,12%) OG ANBEFALES TIL LANGVARIGE BEHANDLINGER MOD PLAK.

Det anbefales at bruge den i tilfælde af:

- Før og efter tandbehandlinger.
- Irritation og rødme i slimhinder og tandkød
- Parodontitis
- Tandkødsbetændelser

Særligt velegnet efter en intensiv behandling med Curasept ADS DNA 0,20 mundskyl.

SÅDAN BRUGER DU MUNDSKYL:

- Skyl munden i mindst 60 sekunder med en spiseskefuld ufortyndet produkt (10 ml), helst efter normal mundhygiejne.
- Fortsæt påføringen i cirka femten dage for 0,20-referencen, cirka en måned for 0,12, og hvis det er nødvendigt at forlænge behandlingen, skal du kontakte tandlægen.

ÅBNING:
Tryk, og drej



LUKNING:
skru samtidigt med at trykke hårdt ned

CURASEPT ADS NEW PARODONTAL GEL 0,5 + DNA



DET INDEHOLDER PVP-VA-COPOLYMER (1%) OG CHLORHEXIDINDIGLUCONAT (0,5%)

Topisk behandling af tandkødet for at lindre irriterings symptomer ved tandpleje af periimplantitis hos brugere af proteser eller ortodontiske apparater og personer med parodontose. Desuden hæmmer det dannelsen og aflejringen af plak på tænderne.

SÅDAN BRUGER DU GEL:

Påfør en lille mængde gel på tandkødet med en finger eller en CURASEPT-tandbørste op til 3 gange om dagen i 2 uger. Til indføringen i tandmellemmene skal du gennemvæde en CURASEPT PROXI-interdentale børste med gel. Hos patienter med parodontose anbefales det at anvende den i tandkødslomerne.

ADVARSLER

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke anvendes, hvis du er overfølsom eller allergisk over for en eller flere komponenter. Hvis der opstår fænomener af sensibilisering, skal du kontakte din specialist. Vask hænderne før og efter brug. Må ikke synkes. Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der er angivet på emballagen, eller hvis emballagen ikke er intakt. Opbevares ved stuetemperatur. Tuben og/eller dens indhold må ikke bortskaffes i miljøet. Luk produktet godt efter brug.

KONTRINDIKATIONER

I tilfælde af intolerance eller allergi skal du afbryde behandlingen og konsultere en læge.

INDBERETNING AF ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Hvis du oplever en alvorlig bivirkning i forhold til produktet, skal du straks kontakte din tandlæge, læge eller apoteker og indberette det til Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA) via telefon eller e-mail til info@curaseptspa.it og til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor brugeren er bosiddende.

FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE OG HÅNDTERING

Produktet kan betragtes som husholdningsaffald og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Produktet må ikke bortskaffes i miljøet.

For bortskaffelsesmetoder henvises til mærkningen på de enkelte emballagematerialer.

FULDFØR ARBEJDET MED DIN MUNDHYGIEJNE VED HJÆLP AF CURASEPT-TANDPASTA, TANDBØRSTER, CURASEPT PROXI-INTERDENTALE BØRSTER OG CURASEPT FLOSS-TANDTRÅDE.



*Deponeret patent
Indeholder fiskefedtets komponenter

Curasept S.p.A.
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)
www.curaseptspa.it

