



Informationen in anderen Sprachen erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes oder unter www.curaseptspta.it.



Die Linie Curasept ADS DNA (Mundspülungen 0, 20, 0,12 und Gel 0,5) bildet dank des PVP-VA-Copolymeren einen Schutzfilm auf den Zähnen und dem Zahnfleisch, der durch eine mechanische Wirkung dazu beiträgt, die durch die Reizung der Mundschleimhaut verursachten Symptome zu lindern. Durch den gleichen Mechanismus verhindert es auch die Bildung und Ablagerung von Zahnbelag. Aus diesem Grund kann sie die normale mechanische Mundhygiene ergänzen oder ersetzen. Die Anwesenheit von DNA-Fractionen erhöht die Viskosität der Lösung und verbessert die Hydratation und das Wohlbefinden der Schleimhäute.

ADS NEW ANTI DISCOLORATION SYSTEM

Äußere Zahnverfärbungen sind eine mögliche Folge einer längeren Anwendung von Produkten, die Chlorhexidin enthalten. Das ADS-System, das mit N-Acetyl-Cystein* (NAC) perfektioniert wurde, das die Wirkung verstärkt, greift in die drei Hauptmechanismen der Pigmentierung ein und trägt dazu bei, ihr Auftreten und ihr Ausmaß zu verringern und das Weiß der Zähne zu schützen.

CURASEPT ADS NEW | DNA MUNDSPÜLUNG 0,20



ENTHÄLT PVP-VA COPOLYMER (1%) UND CHLORHEXIDINDIGLUCONAT (0,20%) UND WIRD FÜR INTENSIVE BEHANDLUNGEN GEGEN DIABETES EMPFOHLEN

Die Anwendung wird empfohlen bei:

- Vor und nach Zahnbehandlungen
- Reizung und Rötung der Schleimhäute und des Zahnfleisches
- Parodontitis
- Zahnfleischentzündungen

CURASEPT ADS NEW | DNA MUNDSPÜLUNG 0,12



Flasche zu 200ml.
Auch im 500-ml-Format erhältlich.

ENTHÄLT PVP-VA COPOLYMER (1%) UND CHLORHEXIDINDIGLUCONAT (0,12%) UND IST FÜR LANGZEITBEHANDLUNGEN GEGEN DIABETES ANGEZEIGT.

Die Anwendung wird empfohlen bei:

- Vor und nach Zahnbehandlungen
- Reizung und Rötung der Schleimhäute und des Zahnfleisches
- Parodontitis
- Zahnfleischentzündungen

Besonders angezeigt nach intensiver Behandlung mit Curasept ADS DNA 0,20 Mundspülung.

ANWENDUNGSWEISE MUNDSPÜLUNGEN:

- Spülen Sie den Mund mindestens 60 s lang mit einem Löffel des unverdünnten Produkts (10 ml), vorzugsweise nach der normalen Mundhygiene.
- Setzen Sie die Anwendung etwa 15 Tage lang für die 0,20-Referenz fort, etwa einen Monat lang für die 0,12-Referenz, und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, wenn es sich als notwendig erweist, die Behandlung zu verlängern.

ÖFFNEN:
Drücken und drehen



SCHLIEßEN:
Schrauben und dabei nach unten drücken

CURASEPT ADS NEW ZAHNFLEISCH GEL 0,5 % + DNA



ENTHÄLT PVP-VA-COPOLYMER (1%) UND CHLORHEXIDINDIGLUCONAT (0,5%)

Topische Behandlung des Zahnfleisches zur Linderung von Reizungssymptomen während der zahnärztlichen Behandlung bei Periimplantitis, bei Trägern von Prothesen oder kieferorthopädischen Apparaturen und bei Parodontalpatienten. Es wirkt auch der Bildung und Ablagerung von Zahnbelag entgegen.

ANWENDUNGSWEISE GEL:

Eine kleine Menge des Gels mit dem Finger oder einer CURASEPT-Zahnbürste auf das Zahnfleisch auftragen, bis zu dreimal täglich während zwei Wochen. Zum Einbringen in die Zahnzwischenräume eine CURASEPT PROXI-Bürste mit Gel imprägnieren.

Bei Parodontopathie-Patienten wird die Anwendung in den Taschen empfohlen.

WARNHINTEIL

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Bestandteile. Bei Sensibilisierung einen Facharzt aufsuchen. Vor und nach der Anwendung Hände waschen. Nicht schlucken. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum oder wenn die Verpackung nicht mehr intakt ist. Bei Raumtemperatur lagern. Entsorgen Sie den Behälter und/oder den Inhalt nicht in der Umwelt. Verschließen Sie das Produkt nach dem Gebrauch fest.

KONTRAINDIKATIONEN

Im Fall einer Unverträglichkeit oder Allergie ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

MELDUNG VON SCHWERWIEGENDEN UNERWÜNSCHTEN WIRKUNGEN

Wenn eine schwerwiegende unerwünschte Wirkung in Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren Zahnarzt, Arzt oder Apotheker wenden und dies Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA) telefonisch oder per E-Mail unter info@curaseptspta.it sowie der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaates, in dem der Anwender niedergelassen ist, mitteilen.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR ENTSORGUNG UND HANDHABUNG

Das Gerät kann als Hausmüll betrachtet und in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung entsorgt werden. Das Gerät darf nicht in der Umwelt entsorgt werden. Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte den Etiketten auf den einzelnen Verpackungsmaterialien.

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHRE MUNDHYGIENE DURCH DIE VERWENDUNG VON CURASEPT-ZAHNPASTEN, CURASEPT-PROXI-BÜRSTEN UND CURASEPT-ZAHNSEIDE.



* Angemeldetes Patent
Enthält aus Fisch gewonnene Bestandteile

Curasept S.p.A.
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)
www.curaseptspta.it

