



Les informations sont disponibles en d'autres langues; scanner le code QR ou aller sur [www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it)



Grâce au copolymère PVP-VA qu'elle contient, la gamme Curasept ADS DNA (bains de bouche 0, 20, 0,12 et gel 0,5) forme une pellicule protectrice sur les dents et les gencives, contribuant ainsi par une action mécanique à soulager les symptômes dus aux irritations de la muqueuse buccale. Par le même mécanisme elle empêche également la formation et le dépôt de plaque dentaire. Elle peut donc compléter ou remplacer les opérations normales d'hygiène bucco-dentaire mécanique. La présence de fractions d'ADN augmente la viscosité des solutions, améliorant l'hydratation et le bien-être des muqueuses.

### ADS NEW ANTI DISCOLORATION SYSTEM

L'usage prolongé de produits contenant de la chlorhexidine peut colorer la surface des dents.

Le système ADS, perfectionné à la N-acétylcystéine\* (NAC) qui favorise son activité, influe sur les trois mécanismes principaux de la pigmentation et contribue à réduire son incidence et son ampleur, protégeant ainsi la blancheur des dents.

## CURASEPT ADS NEW | DNA BAIN DE BOUCHE 0.20



CONTIENT DU COPOLYMÈRE PVP-VA (1%) ET DU DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE (0,20%); RECOMMANDÉ POUR LE TRAITEMENT INTENSIF DE LA PLAQUE DENTAIRE

Son utilisation est recommandée en cas de:

- Avant et après les traitements odontologiques.
- Irritation et rougeurs des muqueuses et des gencives
- Parodontite
- Inflammations des gencives

## CURASEPT ADS NEW | DNA BAIN DE BOUCHE 0.12



Flacon de 200 ml.  
Également disponible en flacon de 500 ml.

CONTIENT DU COPOLYMÈRE PVP-VA (1%) ET DU DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE (0,12%); RECOMMANDÉ POUR LES TRAITEMENTS PROLONGÉS CONTRE LA PLAQUE DENTAIRE

Son utilisation est recommandée en cas de:

- Avant et après les traitements odontologiques.
- Irritation et rougeurs des muqueuses et des gencives
- Parodontite
- Inflammations des gencives

Particulièrement indiqué après un traitement intensif avec le bain de bouche Curasept ADS DNA 0,20.

## MODE D'EMPLOI DES BAINS DE BOUCHE:

- Enjuager la boca durante al menos 60 segundos con una cucharada de producto sin diluir (10 ml), preferiblemente después de una higiene bucal normal.
- Continuar la aplicación durante unos quince días para la referencia 0,20, alrededor de un mes para la 0,12, y consultar al dentista si es necesario prolongar el tratamiento.

PARA ABRIR:  
presionar y girar



PARA CERRAR:  
enrosacar presionando hasta el fondo

## CURASEPT ADS NEW GEL PERIODONTAL 0,5 % + ADN



CONTIENE COPOLÍMERO PVP-VA (1%) Y CLORHEXIDINA DIGLUCONATO (0,5%)

Tratamiento tópico gingival, para aliviar los síntomas de la irritación en las curas odontológicas en caso de periimplantitis, en los portadores de dentadura postiza o de ortodoncias y en los pacientes con enfermedades periodontales. También previene la formación y deposición de la placa dental.

## MODO DE EMPLEO GEL:

Aplicar una pequeña cantidad de gel, con un dedo o con un cepillo CURASEPT, en las encías, hasta 3 veces al día durante 2 semanas. Para la introducción en los espacios interdenciales, impregnar de gel un cepillito Curasept Proxi.

En los pacientes con enfermedades periodontales, se aconseja aplicar en las bolsas.

## CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia a uno o más componentes. Si se producen fenómenos de sensibilización, consultar con el especialista. Lavarse las manos antes y después de usar. No ingerir. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase o si el envase no está intacto. Conservar a temperatura ambiente. No tirar el estuche o su contenido en el medio ambiente. Después de usar, volver a cerrar bien el producto.

## CONTRAINDICACIONES

Si des phénomènes d'intolérance ou d'allergie surviennent, interrompre le traitement et consulter un médecin.

## SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES

En cas d'effet indésirable grave lié au dispositif, consulter immédiatement un dentiste, un médecin ou un pharmacien et le signaler à Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA), Italie, par téléphone ou par e-mail à [info@curaseptspa.it](mailto:info@curaseptspa.it), ainsi qu'aux autorités compétentes de l'état membre de l'Union européenne dans lequel l'utilisateur est établi.

## PRÉCAUTIONS LORS DE L'ÉLIMINATION ET DE LA MANIPULATION

Le dispositif peut être considéré comme un déchet ménager et éliminé conformément à la législation en vigueur. Ne pas jeter le dispositif dans l'environnement. Pour la mise au rebut, se reporter à l'étiquetage des différents matériaux qui composent l'emballage.

## COMPLÉTEZ L'EFFET DE VOTRE HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE EN UTILISANT LES IDENTIFICATES ET LES BROSSES À DENTS CURASEPT, LES BROSSETTES CURASEPT PROXI ET LES FILS DENTAIRES CURASEPT FLOSS.



\* Brevet déposé  
Contient des ingrédients  
issus des poissons

**Curasept S.p.A.**  
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)  
[www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it)

