



Az információk más nyelveken a QR-kód beolvasásával vagy a [www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it) weboldalon érhetők el.



A Curasept ADS DNA termékcsalád (szájvizek 0, 20, 0,12 és gélek 0,5) a PVP VA kopolimer jelenlétének köszönhetően védőfilmet képez a fogakon, és mechanikus hatásával hozzájárul a szájnyálkahártya irritációja által okozott tünetek enyhítéséhez.

Ugyanezen mechanizmus révén gátolja a dentális plakk kialakulását és lerakódását is. A fentiek miatt a normál mechanikai szájhygiéniai rutin kiegészítésére vagy helyettesítésére használható. A DNS-frakciók jelenléte növeli az oldatok viszkózitását és hozzájárul a nyálkahártya hidratálásához és egészségéhez.

## ADS ÚJ ELSZÍNEZŐDÉST GÁTLÓ RENDSZER

A fogak külső elszíneződése a klórhexidint tartalmazó termékek tartós használatának lehetséges következménye. A fokozott teljesítmény érdekében N-acetil-ciszteinnel\* (NAC) dúsított ADS-rendszer, gátolja az elszíneződés három fő mechanizmusát, és segít csökkenteni annak előfordulását és mértékét, megvédve a fogak fehérségét.

## CURASEPT ADS ÚJ | DNA SZÁJÖBLÖGÉTO 0.20



PVP-VA KOPOLIMERT (1%) ÉS KLÓRHEXIDIN-DIGLUKONÁTOT (0,20%) TARTALMAZ, ÉS INTENZÍV PLAKKCSÖKKENTŐ KEZELÉSEKHEZ AJÁNLOTT

Használata a következő esetekben ajánlott:

- Fogászati kezelések előtt és után.
- A szájnyálkahártya és íny irritációja és kipirosodása
- Parodontitis
- Ínygyulladás

## CURASEPT ADS ÚJ | DNA SZÁJÖBLÖGÉTO 0.12



200 ml-es üveg.  
500 ml-es kiszerelésben is kapható.

PVP-VA KOPOLIMERT (1%) ÉS KLÓRHEXIDIN-DIGLUKONÁTOT (0,12%) TARTALMAZ, ÉS TARTÓS PLAKKCSÖKKENTŐ KEZELÉSEKHEZ JAVÁLLOTT

Használata a következő esetekben ajánlott:

- Fogászati kezelések előtt és után.
- A szájnyálkahártya és íny irritációja és kipirosodása
- Parodontitis
- Ínygyulladás

Különösen javallott a Curasept ADS DNA 0.20 szájöblögetővel történő intenzív kezelés után.

## HOGYAN KELL HASZNÁLNI A SZÁJÖBLÖGÉTOKET:

- Öblögessen legalább 60 másodpercig egy kanál hígítatlan termékkel (10 ml), lehetőleg a szokásos szájhygiéniai rutinja után.
- A 0.20-as termék esetén körülbelül két hétig, a 0.12-es termék esetén körülbelül egy hónapig folytassa az alkalmazást, és ha szükségesnek bizonyul a kezelés meghosszabbítása, forduljon fogorvosához.

A FELNYITÁSHOZ:  
nyomja meg és fordítsa el



A LEZÁRÁSHOZ:  
csavarja, miközben lenyomja

## CURASEPT ADS ÚJ PARODONTÁLIS GÉL 0,5% + DNS



PVP-VA KOPOLIMERT (1%) ÉS KLÓRHEXIDIN-DIGLUKONÁTOT (0,5%) TARTALMAZ

Helyi ínykezelés az irritációs tünetek enyhítésére a fogászati kezelésben, periimplantitisz kezelésére, műfogsort vagy fogszabályozót viselők és parodontális beteg esetében. Emellett gátolja a dentális plakk kialakulását és lerakódását is.

## HOGYAN KELL HASZNÁLNI A GÉLT:

Vigyen fel kis mennyiségű gélt a fogínyre ujjával vagy egy CURASEPT fogkefével, naponta legfeljebb 3-szor, 2 héten keresztül. A fogközökbe történő bejuttatáshoz impregnáljon egy CURASEPT PROXI kefével a gélel.

Parodontopátiás betegeknek ajánlott a zsebekben történő alkalmazás.

## FIGYELMEZTETÉSEK

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne használja egy vagy több összetevővel szembeni túlérzékenység vagy allergia jelei esetén.

Ha fokozott érzékenység lép fel, forduljon szakorvoshoz. Használat előtt és után mosson kezet.

Ne nyelje le.

Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után, vagy ha a csomagolás sérült.

Szobahőmérsékleten tárolja.

A csomagolást és/vagy tartalmát megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja.

Használat után szorosan zárja le a terméket.

## ELLENJAVALLATOK

Intolerancia vagy allergia jelei esetén szakítsa meg kezelést és forduljon orvoshoz.

## SÚLYOS NEMKÍVÁNTOS HATÁSOK BEJELENTÉSE

Ha az eszközzel kapcsolatban súlyos mellékhatás jelentkezik, azonnal forduljon fogorvosához, orvosához vagy gyógyszerészhöz, és jelentse ezt a Curasept S.p.A. Via G. Parini 19, Saronno (VA) részére telefonon vagy e-mailben az [info@curaseptspa.it](mailto:info@curaseptspa.it) címre, valamint a felhasználó letelepedése szerinti EU-tagállam illetékes hatóságának.

## ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS KEZELÉSI ÖVINTÉZKEDÉSEK

A tartály háztartási hulladéknak tekinthető, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítható. A tartály nem kerülhet a környezetbe.

A hulladékezelési utasításokat lásd az egyes csomagolóanyagokon található címkéken.

**EGÉSZÍTSE KI SZÁJHYGIÉNIÁJÁT CURASEPT FOGKRÉMEKKEL, FOGKEFEKKEL, CURASEPT PROXI KEFÉKKEL ÉS CURASEPT FOGSELYEMMEL.**



\*Szabadalom folyamatban  
Hal eredetű összetevőket tartalmaz

**Curasept S.p.A.**  
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)  
[www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it)

