



Informazioni
in altre lingue disponibili
scansionando il QR Code
o su www.curaseptspa.it



La linea Curasept ADS DNA (collutori 0,20, 0,12 e gel 0,5), grazie alla presenza del PVP VA copolymer forma una pellicola protettiva sui denti e sulle gengive contribuendo, con una azione meccanica, ad alleviare i sintomi provocati da irritazioni della mucosa orale. Impedisce inoltre con lo stesso meccanismo la formazione e la deposizione di placca dentale. Per questo si può utilizzare ad integrazione o in sostituzione delle normali manovre di igiene orale meccanica. La presenza di frazioni di DNA ne aumenta la viscosità delle soluzioni e aumenta l'idratazione e il benessere delle mucose.

ADS NEW ANTI DISCOLORATION SYSTEM

La colorazione esterna dei denti è una possibile conseguenza di un uso prolungato di prodotti contenenti Clorexidina.

Il sistema ADS, perfezionato con N-Acetil-Cisteina* (NAC) che ne potenzia l'attività, interferisce con i tre principali meccanismi della pigmentazione e contribuisce a diminuirne l'incidenza e l'entità, proteggendo il bianco dei denti.

CURASEPT ADS NEW | DNA COLLUTORIO 0.20



CONTIENE PVP-VA COPOLIMERO (1%) E CLOREXIDINA DIGLUCONATO (0,20%) ED È CONSIGLIATO PER TRATTAMENTI INTENSIVI ANTIPLACCA

Se ne consiglia l'uso in caso di:

- Prima e dopo trattamenti odontoiatrici.
- Irritazione e arrossamento di mucose e gengive
- Parodontiti
- Infiammazioni gengivali

CURASEPT ADS NEW | DNA COLLUTORIO 0.12



Fiaccola da 200ml.
Disponibile anche nel formato da 500ml.

CONTIENE PVP-VA COPOLIMERO (1%) E CLOREXIDINA DIGLUCONATO(0,12%) ED È INDICATO PER TRATTAMENTI PROLUNGATI ANTIPLACCA.

Se ne consiglia l'uso in caso di:

- Prima e dopo trattamenti odontoiatrici.
- Irritazione e arrossamento di mucose e gengive
- Parodontiti
- Infiammazioni gengivali

Particolarmente indicato dopo un trattamento intensivo eseguito con il collutorio Curasept ADS DNA 0,20.

MODALITÀ D'USO COLLUTORI:

- Sciacquare la bocca per almeno 60 secondi utilizzando un cucchiaino di prodotto non diluito (10 ml) preferibilmente dopo la normale igiene orale.
- Continuare l'applicazione per circa quindici giorni per la referenza 0,20, circa un mese per lo 0,12 e, se risultasse necessario prolungare il trattamento, consultare il dentista.

PER APRIRE:
premere e
girare



PER CHIUDERE:
avvitare
premendo a fondo

CURASEPT ADS NEW GEL PARODONTALE 0,5% + DNA



CONTIENE PVP-VA COPOLIMERO (1%) E CLOREXIDINA DIGLUCONATO (0,5%)

Trattamento topico gengivale, per alleviare i sintomi dell'irritazione nelle cure odontoiatriche nelle perimplantiti, nei portatori di protesi o di apparecchi ortodontici e nei soggetti parodontopatici. Inoltre, contrasta la formazione e la deposizione di placca dentale.

MODALITÀ D'USO GEL:

Applicare una piccola quantità di gel, con un dito o con uno spazzolino CURASEPT, sulle gengive, fino a 3 volte al giorno per 2 settimane. Per l'introduzione negli spazi interdentali impregnare di gel uno scovolino CURASEPT PROXI.

Nei soggetti parodontopatici si consiglia l'applicazione nelle tasche.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare in caso di ipersensibilità o allergia a uno o più componenti. Se si verificano fenomeni di sensibilizzazione consultare lo specialista. Lavarsi le mani prima e dopo l'uso. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o se la confezione non si presenta integra. Conservare a temperatura ambiente. Non disperdere l'astuccio e/o il contenuto nell'ambiente. Dopo l'uso richiudere bene il prodotto.

CONTROINDICAZIONI

In caso di fenomeni di intolleranza o allergia, interrompere il trattamento e consultare un medico.

SEGNALAZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI

Qualora si verifichi un effetto indesiderato grave in relazione al dispositivo, è necessario rivolgersi immediatamente al dentista, al medico o al farmacista e darne segnalazione a Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA) tramite telefono o via e-mail a info@curaseptspa.it e all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione Europea ove l'utilizzatore è stabilito.

PRECAUZIONI PER LO SMALTIMENTO E LA MANIPOLAZIONE

Il dispositivo può essere considerato come rifiuto domestico e smaltito in accordo alla legislazione vigente. Il dispositivo non deve essere disperso nell'ambiente. Per le modalità di smaltimento si rimanda all'etichettatura riportata sui singoli materiali di confezionamento.

COMPLETA L'OPERA DELLA TUA IGIENE ORALE UTILIZZANDO DENTIFRICI, SPAZZOLINI CURASEPT, SCOVOLINI CURASEPT PROXI E FILI CURASEPT FLOSS.



*Brevetto Depositato
Contiene componenti di
derivazione ittica

FOGLIETTO



SACCOLTA DIFFERENZIATA
VERIFICA LE INFORMAZIONI SUL TUO COMUNE

Curasept S.p.A.
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)
www.curaseptspa.it