



Az információk más nyelveken a QR-kód beolvasásával vagy a www.curaseptspa.it weboldalon érhetők el.



De Curasept ADS DNA-lijn (mondspoelingen 0, 20, 0,12 en gel 0,5) vormt dankzij de aanwezigheid van PVP VA-copolymeer een beschermende film op de tanden en het tandvlees en draagt, met een mechanische werking, bij aan het verlichten van de symptomen veroorzaakt door irritatie van het mondslimvlies. Met hetzelfde mechanisme voorkomt het ook de vorming en afzetting van tandplak. Om deze reden kan het worden gebruikt om normale mechanische mondhygiëneprocedures te integreren of te vervangen. De aanwezigheid van DNA-fracties verhoogt de viscositeit van de oplossingen en verhoogt de hydratatie en het welzijn van de slijmvlies.

ADS NEW ANTI DISCOLORATION SYSTEM

Langdurig gebruik van producten die chloorhexidine bevatten kan mogelijk een externe verkleuring van de tanden veroorzaken.

Het ADS-systeem, geperfectioneerd met N-Acetyl-Cysteïne* (NAC) dat de werking ervan verbetert, interfereert met de drie belangrijkste mechanismen van pigmentatie en helpt de incidentie en omvang ervan te verminderen, waardoor de witheid van de tanden beschermd wordt.

CURASEPT ADS NEW | DNA MONDSPOELING 0.20



BEVAT PVP-VA COPOLYMEER (1%) EN CHLOORHEXIDINE DIGLUCONAAT (0,20%) EN WORDT AANBEVOLEN VOOR INTENSIEVE BEHANDELINGEN TEGEN TANDSTEEN

Het gebruik ervan wordt aanbevolen in de volgende gevallen:

- Voor en na tandheelkundige behandelingen.
- Irritatie en roodheid van slijmvlies en tandvlees
- Parodontitis
- Ontsteking van het tandvlees

CURASEPT ADS NEW | DNA MONDSPOELING 0.12



Fles van 200 ml.
Ook verkrijgbaar in 500ml-formaat.

BEVAT PVP-VA COPOLYMEER (1%) EN CHLOORHEXIDINE DIGLUCONAAT (0,12%) EN IS GESCHIKT VOOR LANGDURIGE BEHANDELINGEN TEGEN TANDSTEEN.

Het gebruik ervan wordt aanbevolen in de volgende gevallen:

- Voor en na tandheelkundige behandelingen.
- Irritatie en roodheid van slijmvlies en tandvlees
- Parodontitis
- Ontsteking van het tandvlees

Bijzonder geschikt na een intensieve behandeling uitgevoerd met Curasept ADS DNA 0,20 mondspoeling.

GEBUIKSAANWIJZINGEN MONDSPOELING:

- Spoel uw mond gedurende minimaal 60 seconden met een lepel onverdund product (10 ml), bij voorkeur na normale mondhygiëne.
- Zet de behandeling gedurende ongeveer vijftien dagen voort voor de referentie 0,20, ongeveer een maand voor de 0,12 en raadpleeg uw tandarts als verlenging van de behandeling nodig is.

OM TE OPENEN:
drukken en draaien



OM TE SLUITEN:
vastschroeven en volledig indrukken

CURASEPT ADS NEW PERIODONTALE GEL 0,5% + DNA



BEVAT PVP-VA COPOLYMEER (1%) EN CHLOORHEXIDINE DIGLUCONAAT (0,5%)

Topische tandvleesbehandeling, ter verlichting van de symptomen van irritatie bij tandheelkundige zorg bij peri-implantitis, bij dragers van prothesen of orthodontische apparaten en bij personen met parodontopathie. Bovendien gaat het de vorming en afzetting van tandplak tegen.

GEBUIKSAANWIJZINGEN GEL:

Breng een kleine hoeveelheid gel aan op het tandvlees, met een vinger of met een CURASEPT-tandenborstel, maximaal 3 keer per dag, gedurende 2 weken. Voor introductie in de interdentale ruimtes, drinkt u een rager met gel CURASEPT PROXI.

Bij personen met parodontopathie, is toepassing in pockets aanbevolen.

WAARSCHUWINGEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet gebruiken bij overgevoeligheid of allergie voor één of meerdere componenten. Als er sensibiliseringsverschijnselen optreden, raadpleeg dan een deskundige. Was uw handen voor en na gebruik. Niet inslikken. Gebruik het product niet na de vervaldatum aangegeven op de verpakking of als de verpakking niet intact is. Op kamertemperatuur bewaren. Gooi de doos en/of inhoud niet in het milieu. Na gebruik het product goed afsluiten.

CONTRA-INDICATIES

In geval van intolerantie of allergie, de behandeling stopzetten en een arts raadplegen.

MELDING VAN ERNSTIGE BIJWERKINGEN:

Als er een ernstige bijwerking optreedt in verband met het apparaat, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw tandarts, arts of apotheker en dit telefonisch of per e-mail op info@curaseptspa.it Via G. Parini 19, Saronno (VA) via telefoon of via e-mail op info@curaseptspa.it en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker gevestigd is.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VERWIJDERING EN HANTERING

Het apparaat kan worden beschouwd als huishoudelijk afval en moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het apparaat mag niet in het milieu worden weggegooid. Voor verwijderingsmethoden verwijzen wij u naar het etiket op de afzonderlijke verpakkingsmaterialen.

VOLTUO UW MONDHYGIENE DOOR GEBUIK TE MAKEN VAN CURASEPT TANDPASTA EN TANDENBORSTELS, CURASEPT PROXI RAGERS- EN CURASEPT FLOSS DRADEN.



*Patent aangevraagd
Bevat componenten afkomstig van vis

