



Informații în alte limbi sunt disponibile prin scanarea codului QR sau la adresa [www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it)



Linia Curasept ADS ADN (apă de gură 0,20, 0,12 și gel 0,5), prin prezența copolimerului PVP VA, formează o peliculă protectoare pe dinți și gingii, ajutând, printr-o acțiune mecanică, la ameliorarea simptomelor cauzate de iritarea mucoasei bucale. De asemenea, previne formarea și depunerea plăcii dentare prin același mecanism. Acesta este motivul pentru care poate fi folosită pentru a completa sau înlocui manevrele mecanice normale de igienă orală. Prezența fracțiunilor de ADN crește vâscozitatea soluțiilor și sporește hidratarea și sănătatea membranelor mucoase.

## ADS NEW ANTI DISCOLORATION SYSTEM

Decolorarea externă a dinților este o posibilă consecință a utilizării îndelungate a produselor care conțin clorhexidină. Sistemul ADS, perfecționat cu N-Acetil-Cisteină\* (NAC), care îi sporește activitatea, interferează cu cele trei mecanisme principale de pigmentare și contribuie la diminuarea incidenței și amplitudinii acesteia, protejând albul dinților.

## CURASEPT ADS NEW | APĂ DE GURĂ ADN 0.20



CONȚINE COPOLIMER PVP-VA (1%) ȘI DIGLUCONAT DE CLORHEXIDINĂ (0,20%) ȘI ESTE RECOMANDATĂ PENTRU TRATAMENTELE INTENSIVE ANTIPLACĂ

Utilizarea sa este recomandată în caz de:

- Înainte și după tratamentele stomatologice.
- Iritarea și înroșirea membranelor mucoase și a gingiilor
- Parodontită
- Inflamații gingivale

## CURASEPT ADS NEW | APĂ DE GURĂ ADN 0.12



Flacon de 200 ml.  
Disponibil și în format de 500 ml.

CONȚINE COPOLIMER PVP-VA (1%) ȘI DIGLUCONAT DE CLORHEXIDINĂ (0,12%) ȘI ESTE INDICATĂ PENTRU TRATAMENTELE ANTIPLACĂ PRELUNGITE.

Utilizarea sa este recomandată în caz de:

- Înainte și după tratamentele stomatologice.
- Iritarea și înroșirea membranelor mucoase și a gingiilor
- Parodontită
- Inflamații gingivale

În mod special indicată după un tratament intensiv efectuat cu apa de gură Curasept ADS DNA 0,20.

## MODALITATEA DE FOLOSIRE A APEI DE GURĂ

- Clătiți gura timp de cel puțin 60 de secunde folosind o lingură de produs nediluat (10 ml), de preferință după igiena orală normală.
- Continuați aplicarea timp de aproximativ 15 zile pentru referința 0,20, aproximativ o lună pentru referința 0,12, iar dacă se dovedește necesară prelungirea tratamentului, consultați medicul stomatolog.

PENTRU A DESCHIDE:  
apăsați și rotiți



PENTRU A ÎNCHIDE:  
înșurubați  
apăsând complet

## CURASEPT ADS NEW GEL PARODONTAL 0,5% + ADN



CONȚINE COPOLIMER PVP-VA (1%) ȘI DIGLUCONAT DE CLORHEXIDINĂ (0,5%)

Tratament gingival topic, pentru ameliorarea simptomelor de iritație în tratamentele stomatologice în peri-implantite, la purtătorii de proteze sau aparate ortodontice și la pacienții parodontozai. De asemenea, combate formarea și depunerea plăcii dentare.

### MOD DE UTILIZARE GEL:

Aplicați o cantitate mică de gel CURASEPT, cu un deget sau cu o periută de dinți, pe gingii, de până la 3 ori pe zi, timp de 2 săptămâni. Pentru introducerea în spațiile interdentare, impregnați cu gel o periută CURASEPT PROXI.

La persoanele parodontopatie, se recomandă aplicarea în cavități.

## AVERTIZĂRI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate sau alergie la una sau mai multe componente. În cazul în care apar cazuri de sensibilizare, consultați un specialist. Spălați-vă pe mâini înainte și după utilizare. A nu se înghiți. A nu se utiliza produsul după data de expirare indicată pe ambalaj sau dacă ambalajul nu este intact. A se păstra la temperatura camerei. A nu se elimina ambalajul și/sau conținutul în medii înconjurător. După utilizare, închideți bine produsul.

## CONTRAINDICAȚII

În cazul unei intoleranțe sau alergii, întrerupeți tratamentul și consultați un medic.

## RAPORTAREA EFECTELOR NEDORITE GRAVE

În cazul în care apare un efect nedorit grav în legătură cu dispozitivul, trebuie să contactați imediat medicul stomatolog, medicul sau farmacistul și să raportați acest lucru la Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA) prin telefon sau prin e-mail la adresa [info@curaseptspa.it](mailto:info@curaseptspa.it) și la autoritatea competentă din Statul membru al UE în care își are domiciliul utilizatorul.

## PRECAUȚII PRIVIND ELIMINAREA ȘI MANIPULAREA

Dispozitivul poate fi considerat deșeu menajer și poate fi eliminat în conformitate cu legislația în vigoare. Dispozitivul nu trebuie să fie aruncat în medii înconjurător. Pentru instrucțiuni privind eliminarea, vă rugăm să consultați eticheta de pe fiecare material de ambalare în parte.

## COMPLETEAZĂ-ȚI ACTIVITATEA DE IGIENĂ ORALĂ FOLOSIND PASTELE DE DINȚI CURASEPT, PERIUTELE DE DINȚI CURASEPT PROXI ȘI AȚA DENTARĂ CURASEPT.



\*Brevet depus  
Conține componente  
derivate din pește



**Curasept S.p.A.**  
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)  
[www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it)