



Informationen in anderen Sprachen erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes oder unter www.curaseptspa.it

ZAHNFLEISCHGEL 1%

Topische Behandlung des Zahnfleisches zur Linderung von Reizungssymptomen während der zahnärztlichen Behandlung bei Periimplantitis, bei Trägern von Prothesen oder kieferorthopädischen Apparaturen und bei Parodontalpatienten.

Es wirkt auch die Bildung und Ablagerung von Zahnbelag entgegen.

ADS NEW - ANTI DISCOLORATION SYSTEM

Äußere Zahnverfärbungen sind eine mögliche Folge einer längeren Anwendung von Produkten, die Chlorhexidin enthalten.

Das ADS-System, das mit N-Acetyl-Cystein* (NAC) perfektioniert wurde, das die Wirkung verstärkt, greift in die drei Hauptmechanismen der Pigmentierung ein und trägt dazu bei, ihr Auftreten und ihr Ausmaß zu verringern und das Weiß der Zähne zu schützen.

INDIKATIONEN

CURASEPT Parodontal-Gel bildet dank des Vorhandenseins von PVP-VA COPOLYMER-Copolymer 1 % einen Schutzfilm auf dem Zahnfleisch und trägt durch eine mechanische Wirkung zur Linderung der durch die Reizung der Mundschleimhaut verursachten Symptome bei.

Durch den gleichen Mechanismus verhindert es auch die Bildung und Ablagerung von Zahnbelag.

Das Vorhandensein von Chlorhexidindigluconat 1 % gewährleistet außerdem eine wirksame

antiseptische Wirkung auf die filmbildende Komponente.

Es wirkt lokal und verursacht kein Brennen.

EINSATZWEISE

Eine kleine Menge des Gels mit dem Finger oder einer CURASEPT-Zahnbürste auf das Zahnfleisch auftragen, bis zu dreimal täglich während zwei Wochen.



Zum Einbringen in die Zahnzwischenräume eine CURASEPT PROXI-Bürste mit Gel imprägnieren.

- Gießen Sie eine kleine Menge Gel in die Gelkappe
- Tauchen Sie eine Proxi-Bürste in das Gel, sodass sie mit dem Produkt imprägniert wird
- Reinigen Sie die Zahnzwischenräume gründlich
- Spülen Sie Bürste und Kappe gründlich aus, bevor Sie die Geltube schließen.

Bei Parodontopathie-Patienten wird die Anwendung in den Taschen empfohlen.

WARNHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor und nach der Anwendung Hände waschen. Nicht schlucken.

Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum oder wenn die Verpackung nicht mehr intakt ist.

Das Produkt bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Bestandteile nicht verwenden.

Bei Sensibilisierung einen Zahnarzt aufsuchen. Bei Raumtemperatur lagern.

Entsorgen Sie den Behälter und/oder den Inhalt nicht in der Umwelt.

Verschließen Sie die Tube nach dem Öffnen fest.

KONTRAINDIKATIONEN

Im Fall einer Unverträglichkeit oder Allergie ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

MELDUNG VON SCHWERWIEGENDEN UNERWÜNSCHTEN WIRKUNGEN:

Wenn eine schwerwiegende unerwünschte Wirkung in Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren Zahnarzt, Arzt oder Apotheker wenden und dies Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA) telefonisch oder per E-Mail unter info@curaseptspa.it sowie der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaates, in dem der Anwender niedergelassen ist, mitteilen.

VORSICHTSMA NAHMEN FÜR ENTSORGUNG UND HANDHABUNG

Das Gerät kann als Hausmüll betrachtet und in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung entsorgt werden. Das Gerät darf nicht in der Umwelt entsorgt werden. Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte den Etiketten auf den einzelnen Verpackungsmaterialien.

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHRE MUNDHYGIENE DURCH DIE VERWENDUNG VON CURASEPT-ZAHNBÜRSTEN, CURASEPT-PROXI-BÜRSTEN UND CURASEPT-ZAHNSEIDE.



* Angemeldet bei Patent



Curasept S.p.A.
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)
Tel. +39 02 96 22 799 - www.curaseptspa.it

