



Les informations sont disponibles en d'autres langues ; scanner le code QR ou aller sur [www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it)

## GEL GINGIVAL 1%

Traitement gingival topique pour soulager les symptômes d'irritation lors des traitements odontologiques des péri-implantites, pour les personnes qui portent des prothèses ou appareils dentaires et pour les sujets atteints de parodontopathie.

Prévient également la formation et le dépôt de plaque dentaire.

## ADS NEW - ANTI DISCOLORATION SYSTEM

L'usage prolongé de produits contenant de la chlorhexidine peut colorer la surface des dents.

Le système ADS, perfectionné à la N-acétylcystéine\* (NAC) qui favorise son activité, influe sur les trois mécanismes principaux de la pigmentation et contribue à réduire son incidence et son ampleur, protégeant ainsi la blancheur des dents.

## INDICATIONS

Grâce au COPOLYMÈRE PVP-VA 1 % qu'il contient, CURASEPT gel gingival forme une pellicule protectrice sur les gencives, contribuant ainsi par une action mécanique à soulager les symptômes dus aux irritations de la muqueuse buccale.

Par le même mécanisme il empêche également la formation et le dépôt de plaque dentaire.

La présence de digluconate de chlorhexidine 1 % assure une action antiseptique efficace sur la composante filmogène.

Agit au niveau local et ne provoque pas de brûlure.

## MODE D'EMPLOI

Appliquer une petite quantité de gel sur les gencives à l'aide d'un doigt ou d'une brosse à dents CURASEPT, jusqu'à 3 fois par jour pendant 2 semaines.



Pour accéder aux espaces interdentaires, imprégner une brosse CURASEPT PROXI de gel.

- Verser une petite quantité de gel dans le bouchon prévu à cet effet
- plonger une brosse Proxi dans le gel jusqu'à ce qu'elle soit imbibée de produit
- bien nettoyer l'espace interdentaire
- rincer soigneusement la brosse et le bouchon avant de refermer le tube de gel.

Pour toutes les personnes atteintes de parodontopathie, il est recommandé d'appliquer le produit dans les poches.

## AVERTISSEMENTS

Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains avant et après l'utilisation.

Ne pas avaler.

Ne pas utiliser le produit au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage ou si l'emballage n'est pas intact.

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un ou plusieurs ingrédients.

Si des phénomènes de sensibilité

surviennent, consulter un dentiste. Conserver à température ambiante. Ne pas jeter l'étui et/ou son contenu dans la nature.

Bien refermer le tube après l'ouverture.

## CONTRE-INDICATIONS

Si des phénomènes d'intolérance ou d'allergie surviennent, interrompre le traitement et consulter un médecin.

## SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES:

En cas d'effet indésirable grave lié au dispositif, consulter immédiatement un dentiste, un médecin ou un pharmacien et le signaler à Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA), Italie, par téléphone ou par e-mail à [info@curaseptspa.it](mailto:info@curaseptspa.it), ainsi qu'aux autorités compétentes de l'état membre de l'Union européenne dans lequel l'utilisateur est établi.

## PRÉCAUTIONS LORS DE L'ÉLIMINATION ET DE LA MANIPULATION


Le dispositif peut être considéré comme un déchet ménager et éliminé conformément à la législation en vigueur. Ne pas jeter le dispositif dans l'environnement. Pour la mise au rebut, se reporter à l'étiquetage des différents matériaux qui composent l'emballage.

**COMPLÉTEZ L'EFFET DE VOTRE HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE EN UTILISANT LES BRUSSES À DENTS CURASEPT, LES BRUSSETTES CURASEPT PROXI ET LES FILS DENTAIRES CURASEPT FLOSS.**

CE 0373



\* Brevet déposé

 Curasept S.p.A.  
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)  
Tel. +39 02 96 22 799 - [www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it)

