



Informazioni in altre lingue
disponibili scansionando il QR Code
o su www.curaseptspa.it

GEL PARODONTALE 1%

Trattamento topico gengivale, per alleviare i sintomi dell'irritazione nelle cure odontoiatriche nelle perimplantiti nei portatori di protesi o di apparecchi ortodontici e nei soggetti parodontopatici.

Inoltre, contrasta la formazione e la deposizione di placca dentale.

ADS NEW - Anti Discoloration System

La colorazione esterna dei denti è una possibile conseguenza di un uso prolungato di prodotti contenenti Clorexidina.

Il sistema ADS, perfezionato con N-Acetil-Cisteina* (NAC) che ne potenzia l'attività, interferisce con i tre principali meccanismi della pigmentazione e contribuisce a diminuirne l'incidenza e l'entità, proteggendo il bianco dei denti.

INDICAZIONI

CURASEPT gel parodontale, grazie alla presenza del PVP-VA COPOLIMERO copolymer 1% forma una pellicola protettiva sulle gengive contribuendo, con una azione meccanica, ad alleviare i sintomi provocati da irritazioni della mucosa orale.

Impedisce inoltre con lo stesso meccanismo la formazione e la deposizione di placca dentale. La presenza di clorexidina digluconato

1% assicura anche un'efficace azione antisettica sulla componente filmogena. Agisce localmente e non provoca bruciore.

MODALITÀ D'USO:

Applicare una piccola quantità di gel, con un dito o con uno spazzolino CURASEPT, sulle gengive, fino a 3 volte al giorno, per 2 settimane.



Per l'introduzione negli spazi interdentali impregnare di gel uno scovolino CURASEPT PROXI.

- Versare una piccola quantità di gel nell'apposito tappino
- intingere uno scovolino Proxi nel gel in modo da impregnarlo di prodotto
- effettuare la corretta pulizia interdentale
- sciacquare accuratamente scovolino e tappino prima di richiudere il tubetto di gel.

Nei soggetti parodontopatici si consiglia l'applicazione nelle tasche.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavarsi le mani prima e dopo l'uso.

Non ingerire.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o se la confezione non si presenta integra.

Non usare il prodotto in caso di ipersensibilità o allergia ad uno o più componenti

Se si verificano fenomeni di sensibilizzazione consultare l'Odontoiatra. Conservare a temperatura ambiente.

Non disperdere l'astuccio e/o il contenuto nell'ambiente. Richiudere bene il tubetto dopo l'apertura.

CONTROINDICAZIONI

In caso di fenomeni di intolleranza o allergia, interrompere il trattamento e consultare un medico.

SEGNALAZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI:

Qualora si verifichi un effetto indesiderato grave in relazione al dispositivo, è necessario rivolgersi immediatamente al dentista, al medico o al farmacista e darne segnalazione a Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA) tramite telefono o via e-mail a info@curaseptspa.it e all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione Europea ove l'utilizzatore è stabilito.

PRECAUZIONI PER LO SMALTIMENTO E LA MANIPOLAZIONE

Il dispositivo può essere considerato come rifiuto domestico e smaltito in accordo alla legislazione vigente. Il dispositivo non deve essere disperso nell'ambiente. Per le modalità di smaltimento si rimanda all'etichettatura riportata sui singoli materiali di confezionamento.

COMPLETA L'OPERA DELLA TUA IGIENE ORALE UTILIZZANDO SPAZZOLINI CURASEPT, SCVOLINI CURASEPT PROXI E FILI CURASEPT FLOSS.



*Brevetto Depositato

Curasept S.p.A.
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA)
Tel. +39 02 96 22 799 - www.curaseptspa.it

