



Informatie in andere talen beschikbaar door de QR-code te scannen

## PERIODONTALE GEL 1%

Topische tandvleesbehandeling, om de symptomen van irritatie te verlichten in de tandheelkundige zorg bij peri-implantitis bij dragers van prothesen of orthodontische apparaten en bij personen met parodontopathie. Bovendien gaat het de vorming en afzetting van tandplak tegen.

## ADS NEW – ANTI DISCOLORATION SYSTEM

Langdurig gebruik van producten die chloorhexidine bevatten kan mogelijk een externe verkleuring van de tanden veroorzaken.

Het ADS-systeem, geperfectioneerd met N-Acetyl-Cysteïne\* (NAC) dat de werking ervan verbetert, interfereert met de drie belangrijkste mechanismen van pigmentatie en helpt de incidentie en omvang ervan te verminderen, waardoor de witheid van de tanden beschermd wordt.

## AANWIJZINGEN

CURASEPT parodontale gel vormt, dankzij de aanwezigheid van PVP-VA COPOLYMER-copolymeer 1%, een beschermende film op het tandvlees en draagt, met een mechanische werking, bij aan het verlichten van de symptomen veroorzaakt door irritatie van het mondslijmvlies.

Met hetzelfde mechanisme voorkomt het ook de vorming en afzetting van tandplak.

De aanwezigheid van 1% chloorhexidinedigluconaat zorgt ook voor een effectieve antiseptische werking op de filmvormende component. Locale actie, veroorzaakt geen branderig gevoel.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Breng een kleine hoeveelheid gel aan op het tandvlees, met een vinger of met een CURASEPT-tandenborstel, maximaal 3 keer per dag, gedurende 2 weken.



Voor introductie in de interdentale ruimtes, drinkt u een rager met gel CURASEPT PROXI.

- Giet een kleine hoeveelheid gel in de daarvoor bestemde dop
  - drink een Proxi-rager in de gel om deze met product te laten impregneren
  - voer een correcte interdentale reiniging uit
  - spoel de rager en de dop zorgvuldig af voordat u de tube met gel sluit.
- Bij personen met parodontopathie, raadt men toepassing in pockets aan.

## WAARSCHUWINGEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Was uw handen voor en na gebruik. Niet inslikken.

Gebruik het product niet na de vervaldatum aangegeven op de verpakking of als de verpakking niet intact is.

Het product niet gebruiken bij overgevoeligheid of allergie voor één of meerdere componenten.

Als er sensibiliseringsverschijnselen optreden, raadpleeg dan uw tandarts.

Op kamertemperatuur bewaren. Gooi de doos en/of inhoud niet in het milieu.

Sluit de tube na opening goed af.

## CONTRA-INDICATIES

In geval van intolerantie of allergie, de behandeling stopzetten en een arts raadplegen.

## MELDING VAN ERNSTIGE BIJWERKINGEN:

Als er een ernstige bijwerking optreedt in verband met het apparaat, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw tandarts, arts of apotheker en dit telefonisch of per e-mail op [info@curaseptspa.it](mailto:info@curaseptspa.it) melden aan Curasept S.p.A Via G. Parini 19, Saronno (VA) via telefoon of via mail aan [info@curaseptspa.it](mailto:info@curaseptspa.it) en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker gevestigd is.

## VOEZORGSMAATREGELEN VOOR VERWIJDERING EN HANTERING

Het apparaat kan worden beschouwd als huishoudelijk afval en moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het apparaat mag niet in het milieu worden weggegooid. Voor verwijderingsmethoden verwijzen wij u naar het etiket op de afzonderlijke verpakkingsmaterialen.

**VOLTUOI UW MONDHYGIENE DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN CURASEPT TANDENBORSTELS, CURASEPT PROXI RAGERS EN CURASEPT FLOSS DRADEN.**



\*Patent aangevraagd



Curasept S.p.A.  
Via G. Parini, 19 – 21047 Saronno (VA)  
Tel. +39 02 96 22 799 - [www.curaseptspa.it](http://www.curaseptspa.it)

